
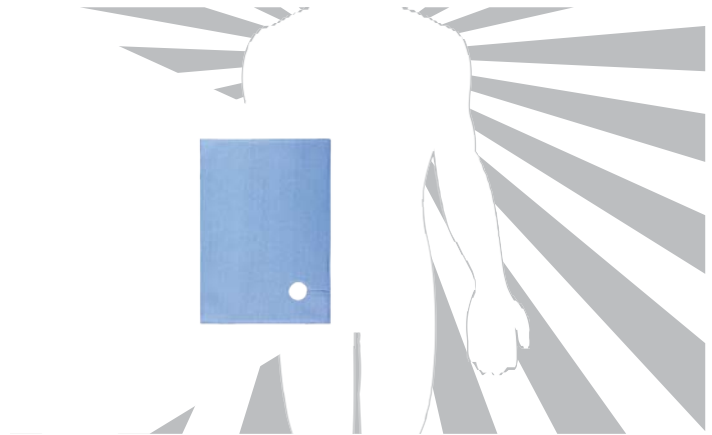


Scatter Armor Angiography Shield

SA-AGS, SA-AGS-CS

Transzfemorális behatolás:
angiographia, coronarographia

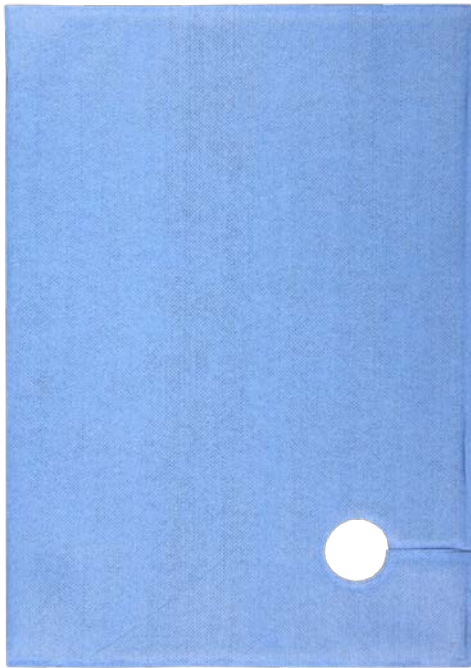

Cikkszám	Leírás
SA-AGS	Scatter Armor Angiography Shield, Nedvszívó, Kerek ablakkal, Dobozban 15 db/doboz
SA-AGS-CS	Scatter Armor Angiography Shield, Nedvszívó, Kerek ablakkal, Dobozban 45 db/csomag

Méret	30,4 cm x 43,1 cm Ablak átmérő: 3,8 cm
Sugárgyengítés	Nagyobb mint 92% 90 kVp-nél
Védelem	Nagyobb mint 0.25mm LE
Maganyag	KIARMOR Bi-Layer ólommentes

Olvassa el a használati utasítást:

1. Távolítsa el a textilt / pajzsot a tasakból a sterilitás megsértése nélkül.
2. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre. Helyezze az ablakot a kívánt területre és / vagy a megtekinteni kívánt területre.
3. Igazítsa a sugárnyalábot az ablak méretéhez (ha azon keresztül kíván vizsgálni egy adott területet).
4. Ne tartsa a textilt / pajzsot a direkt sugárzás útjába.
5. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre úgy, hogy azzal a sugárnyaláb és az orvos vagy az asszisztens között maximalizálja a biztonságos terület nagyságát.
6. Rögzítse a textilt / pajzsot a páciensen a megfelelő pozícióban (a textil / pajzs ragasztócsíkjának használatával). Ne ragassza közvetlenül a páciens bőrére.



Egyszer használatos

STERILE EO



Infab Corporation
1040 Avenida Acaso
Camarillo, CA 93012
E-mail info@infabcorp.com
Telefon: 805-987-5255
Fax: 805-482-8424

Importőr és forgalmazó:
NextGenMed Hungary Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.
E-mail: sales@nextgenmed.hu
www.nextgenmed.hu



Ne használja, ha a termék vagy annak csomagolása sérült.

CE tanúsítás

A D modul és a CE típusvizsgálati tanúsítás az (EU) 2016/425 rendelet alapján kiadva a 0338 számú BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14 (Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 9EH, United Kingdom) bejelentett szervezet által.

FIGYELMEZTETÉS

A termék steril, kivéve, ha a csomagolását kinyitották vagy megrongálták. Felhasználandó a rutin sugárvédelmi eszközök kiegészítéseként, de nem azok helyett.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi címen: www.infabcorp.com