


Scatter Armor Multipurpose Shield

SA-MPS, SA-MPS-CS

Transradiális behatolás, shunt, biliaris drainage,
gerincsebészet, fibroid embolizáció

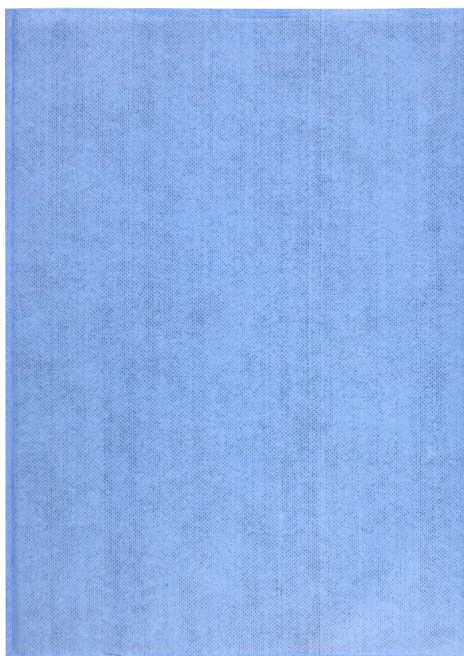

Egyszer használatos

STERILE EO



Infab Corporation 1040
Avenida Acaso
Camarillo, CA 93012
E-mail: info@infabcorp.com
Telefon: 805-987-5255
Fax: 805-482-8424

Importőr és forgalmazó:
NextGenMed Hungary Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.
E-mail: sales@nextgenmed.hu
www.nextgenmed.hu



Ne használja, ha a termék
vagy annak csomagolása sérült.

CE tanúsítás

A D modul és a CE típusvizsgálati tanúsítás az (EU) 2016/425 rendelet alapján kiadva a 0338 számú BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14 (Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 9EH, United Kingdom) bejelentett szervezet által.

FIGYELMEZTETÉS

A termék steril, kivéve, ha a csomagolását kinyitották vagy megrongálták. Felhasználandó a rutin sugárvédelmi eszközök kiegészítéseként, de nem azok helyett.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi címen: www.infabcorp.com

Cikkszám	Leírás
SA-MPS	Scatter Armor Multipurpose Shield, Nedvszívó, Ablak nélküli, Dobozban 15 db/doboz
SA-MPS-CS	Scatter Armor Multipurpose Shield, Nedvszívó, Ablak nélküli, Csomagban 45 db/csomag
Méret	30,4 cm x 43,1 cm
Sugárgyengítés	Nagyobb mint 92% 90 kVp-nél
Védelem	Nagyobb mint 0.25mm LE
Maganyag	KIARMOR Bi-Layer ólommentes

Olvassa el a használati utasítást:

1. Távolítsa el a textilt / pajzsot a tasakból a sterilitás megsértése nélkül.
2. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre.
3. Ne tartsa a textilt / pajzsot a direkt sugárzás útjába.
4. Helyezze a textilt / pajzsot a páciensre úgy, hogy azzal a sugárnyaláb és az orvos vagy az asszisztens között maximalizálja a biztonságos terület nagyságát.
5. Rögzítse a textilt / pajzsot a páciensen a megfelelő pozícióban (a textil / pajzs ragasztócsíkjának használatával). Ne ragassza közvetlenül a páciens bőrére.